



Zakład Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

Ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Pawilon 5

Tel.: rejestracja: 52 36 44 645, kierownik: 52 36 55 447

POBIERANIE MATERIAŁU W KIERUNKU NUŻEŃCA LUDZKIEGO

- Przed wykonaniem badania należy zrezygnować z wykonania makijażu, skóra twarzy nie może być posmarowana kremem, pudrem czy fluidem, rzęsy nie mogą być pomalowane tuszem.
- Rzęsy powinny być suche, bez maści, najlepiej nieumyte po nocnym wypoczynku - na kilka dni przed badaniem należy odstawić okłady ziołowe czy leki miejscowe - w przypadku włosów należy co najmniej na 1 dobę przed pobraniem materiału unikać kontaktu z kosmetykami.
- Badanie najlepiej wykonać przed włączeniem leczenia miejscowego lub z tygodniowym odstępem od leków miejscowych, przed oczyszczaniem twarzy u kosmetyczki

Materiał do badania stanowią: łuski naskórkowe, włosy, rzęsy

Instrukcja pobrania

1. Materiał do badań pobrać za pomocą jałowej pęsety (rzęsy), tępej strony jałowego skalpela lub szpatułki (zeskrobiny skórne) z miejsc zmienionych chorobowo.
2. W przypadku rzęs pobrać po 5 rzęs z jednego oka (z górnej i dolnej powieki łącznie).
3. Pobrany materiał umieścić na szkiełku podstawowym i nanieść kroplę roztworu KOH/DMSO* lub w przypadku jego braku kroplę jałowego roztworu soli fizjologicznej.
4. Nałożyć szkiełko nakrywkowe i docisnąć.
5. Preparat dostarczyć w ciągu 2 godzin do Zakładu Mikrobiologii.

Uwaga: W przypadku pobierania materiału z prawego i lewego oka od jednego pacjenta należy użyć dwóch szkiełek podstawowych i odpowiednio je opisać.

* Dostępny w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej – proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu wydania zakraplacza z odczynnikiem.